

**CARE *CON* Urinalkondome.  
Mit Sicherheit und hohem  
Tragekomfort.**

Die Lösung zur Versorgung mit  
Urinalkondomen bei männlicher  
Harninkontinenz



**Ihr Spezialist rund  
um die Versorgung  
mit ableitenden  
Inkontinenzprodukten.**

[www.mpf-medical.de](http://www.mpf-medical.de)



**Mit Sicherheit  
und hohem  
Tragekomfort.**

## **Die Lösung zur Versorgung mit Urinalkondomen bei männlicher Harninkontinenz.**

Mit einer Harninkontinenz fühlen sich Betroffene oftmals in ihren Aktivitäten eingeschränkt und ziehen sich aus dem sozialen Leben zurück. Dabei gibt es anwendungsfreundliche medizinische Hilfsmittel, die selbstständig angewandt werden können und die Sicherheit im täglichen Miteinander zurückgeben.

Für Männer bieten sich als Lösung bei Harninkontinenz Urinalkondome an, die tagsüber und/oder auch nachts getragen werden können. Die Urinalkondome haben die Form eines Kondoms, allerdings mit einer Anschlussmöglichkeit für einen Urinbeutel.

Für die Versorgung der männlichen Harninkontinenz stellen Urinalkondome eine gute und sinnvolle Alternative, sowohl zu aufsaugenden Hilfsmitteln wie Vorlagen oder Windeln als auch zum Dauerkatheterismus, dar.

Mit den CARE CON Urinalkondomen bieten wir Ihnen eine neue, einzigartige Produktlinie, die aus einem speziell konzipierten, hautfreundlichen und angenehm zu tragenden Material besteht. Darüber hinaus überzeugen die Urinalkondome durch eine sehr gute Klebkraft, die Ihnen einen zuverlässigen und sicheren Halt bietet.

CARE CON Urinalkondome – Sicherheit und hoher Tragekomfort, neu definiert.

# CARE CON Urinkondome

## Warum ist eine Urinkondom-Versorgung sinnvoll?

Urinkondome sind eine mehr als gute Alternative zu Vorlagen oder Windeln bei der männlichen Harninkontinenz.

Die Harninkontinenz kann unter anderem entstehen durch:

- Operative Eingriffe an der Prostata oder der Harnblase
- Erkrankungen wie Morbus Alzheimer, Morbus Parkinson oder Multipler Sklerose
- Verletzungen des Schließmuskelsystems der Blase

## Die Vorteile von Urinkondomen

- Teilnahme am sozialen Leben und Mobilität
- Geruchsfreie Harnableitung
- Vermeidung von Folgekomplikationen durch Einnässen und feuchte Vorlagen
- Kein Risiko von Harnwegsinfekten durch die Versorgung mit Dauerkathetern
- Einfache Handhabung, auch durch pflegende Angehörige oder Pflegekräfte

Bei den CARE CON Urinkondomen werden die genannten Vorteile noch durch einen sehr angenehmen Tragekomfort und den sehr sicheren Halt ergänzt.

## Welche Voraussetzungen gibt es für die Anwendung eines Urinkondoms?

Bei der Verwendung von Urinkondomen sollte die Penishaut gesund sein. Für die unterschiedlichen Längen gibt es CARE CON Urinkondome in verschiedenen Ausführungen: Neben der Standardlänge von 8 cm sind für einen kürzeren, sogenannten retrahierten Penis die CARE CON special | Typ II mit einer Länge von 5 cm erhältlich.

Eine weitere Voraussetzung für eine langfristige Versorgung der Betroffenen ist, dass die Blase grundsätzlich ohne Restharmengen entleert werden kann. Sollte Restharn in der Blase verbleiben, steigt das Risiko der Keimbildung und somit von Blasenentzündungen.

Wichtig für eine zuverlässige Nutzung von Urinkondomen ist die richtige Größe. Weder ein zu großes noch ein zu enges Urinkondom führt zu einer zufriedenstellenden Versorgung.

Um die richtige Größe zu finden, nutzen Sie die Größenschablone, mit der Sie den Umfang des Penis messen. So können Sie den richtigen Durchmesser des Urinkondoms ermitteln. Weiterhin muss die Länge des Penis gemessen werden, um die Schaftlänge des Urinkondoms und die entsprechende Klebefläche festlegen zu können.

Wenn Betroffene die richtige Form und Größe verwenden, bieten die CARE CON Urinkondome in Verbindung mit einem Bein- oder Bettbeutel eine sichere und hygienische Anwendung. Die korrekte Anlage bedarf einer gewissen Fingerfertigkeit. Ist diese eingeschränkt kann die Anlage auch durch pflegende Angehörige oder Fachpersonal erfolgen.



# CARE CON Urinkondome

## Was ist das Besondere an den CARE CON Urinkondomen?

Mit den CARE CON Urinkondomen werden neue Maßstäbe an Tragekomfort, Halt und Zuverlässigkeit gesetzt.

Die CARE CON Urinkondome sind aus einem hautfreundlichen, medizinischen Silikon, selbstklebend, latexfrei und atmungsaktiv. Allergische Reaktionen oder Hautirritationen sind durch das hochwertige Silikonmaterial so gut wie ausgeschlossen.

Durch eine einzigartige, speziell konzipierte Materialstärke legt sich das Silikonmaterial sanft an die Haut an, ohne etwaige Falten zu bilden. Dadurch wird der Tragekomfort, die Passgenauigkeit und die Sicherheit gewährleistet.

Der spezielle Kleber ist von so hochwertiger Qualität, damit keine Hautirritationen ausgelöst werden. Der Kleberauftrag ist so präzise ermittelt, um mit der hohen Klebkraft den sicheren Halt zu gewährleisten, aber sich beim Abrollen des Urinkondoms rückstandslos von der Haut ablösen lässt.

Der Kleberauftrag beginnt auf dem Schaft nicht bereits im vorderen Bereich an der Penisspitze oder Eichel, sondern erst dahinter. Damit wird ein unangenehmes Kleben auf der Eichel sowie etwaige Irritationen oder Schmerzen beim Abrollen des Urinkondoms vermieden.

Das atmungsaktive Silikonmaterial transportiert die Körperfeuchtigkeit automatisch ab und gewährleistet einen sicheren Halt des Urinkondoms, auch beim Schwitzen. Durch das transparente Material lassen sich etwaige Hautveränderungen sofort und schnell erkennen.

Die CARE CON Urinkondome haben vorne ein sogenanntes Reservoir, an dem kein Kleber aufgebracht ist. Das Reservoir sichert den Urinabfluss in den angeschlossenen Beutel, auch bei schwallartigem Harnverlust.

Zum Auffangen des Urins lassen sich Bein- und Bettbeutel anschließen, so dass für mobile und immobile Anwender für den Tag und für die Nacht ein breites Sortiment an Urinbeuteln zur Verfügung steht.



## Größenübersicht der CARE CON Urinkondome

### CARE CON comfort | Typ I – der Standard für Anforderungen vieler Anwender

Schaftlänge: 8,0 cm  
Klebefläche: 4,5 cm



### CARE CON special | Typ II für Anwender mit kurzem, retrahiertem Penis

Schaftlänge: 5,0 cm  
Klebefläche: 4,0 cm



### CARE CON active | Typ III für sportliche und sehr aktive Anwender


Schaftlänge: 8,0 cm  
Klebefläche: 7,0 cm




Die CARE CON Urinkondome werden in einer praktischen Monatsverpackung à 30 Stk. geliefert.




# Anwendungstipps zum Umgang mit CARE CON Urinalkondomen

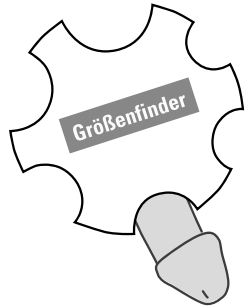

Mithilfe der Größentabellen die geeignete Größe auswählen.

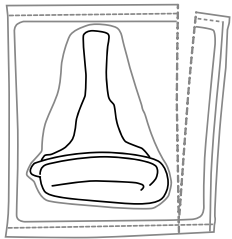


Prüfen Sie die Modellbezeichnung und Größe auf dem Produktetikett, um sicherzustellen, dass Modell und Größe korrekt sind.

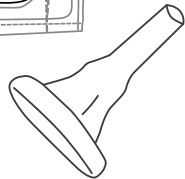

Die Verpackung öffnen und das Produkt auf Unversehrtheit überprüfen.

Lösen Sie das Urinalkondom vom Hütchen.


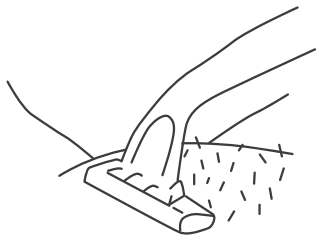


Die Schamhaare rasieren, um zu verhindern, dass Haare in das Urinalkondom hineinragen und verkleben.

Insbesondere die Haare an der Peniswurzel müssen entfernt werden.




Hände und Penis waschen und abtrocknen.

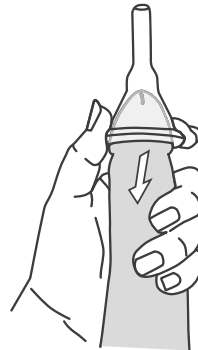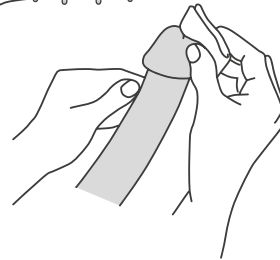


Anschließend das Urinalkondom über die Eichel stülpen.

Achten Sie dabei darauf, dass die Eichel etwas vom Trichterende entfernt ist.

Das Urinalkondom vorsichtig über den Penis abrollen und glätten.

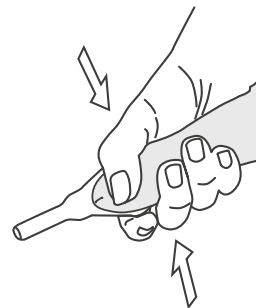


Das Urinalkondom leicht an den Penis andrücken.

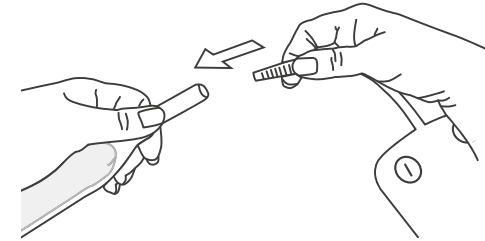

Das Anschlussstück des Urinalkondoms an einen Urin-Bettbeutel oder Beinbeutel anschließen.

Leicht am Anschlussstück ziehen, um sicherzustellen, dass der Urinbeutel fest mit dem Urinalkondom verbunden ist.

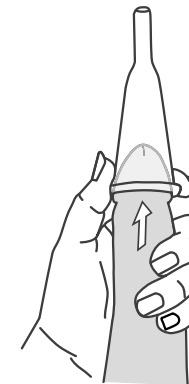

Zum Entfernen des Urinalkondoms zunächst den Urin- bzw. Beinbeutel vom Anschlussstück des Urinalkondoms abnehmen.

Anschließend die Manschette des Urinalkondoms vorsichtig vom Penis abrollen.



# CARE CON Urinkondome

Die CARE CON Urinkondome stehen in drei unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung:

## CARE CON comfort | Typ I – der Standard für Anforderungen vieler Anwender

Schaftlänge: 8,0 cm | Klebefläche: 4,5 cm

Durchmesser	Artikelnummer	PZN
25 mm	01/01/27/01/25/GHC	17520554
28 mm	01/01/27/01/28/GHC	17520583
30 mm	01/01/27/01/30/GHC	17520620
32 mm	01/01/27/01/32/GHC	17520637
36 mm	01/01/27/01/36/GHC	17520643
41 mm	01/01/27/01/41/GHC	17520666



## CARE CON special | Typ II für Anwender mit kurzem, retrahiertem Penis

Schaftlänge: 5,0 cm | Klebefläche: 4,0 cm

Durchmesser	Artikelnummer	PZN
25 mm	01/01/27/02/25/GHC	17520672
28 mm	01/01/27/02/28/GHC	17520689
30 mm	01/01/27/02/30/GHC	17520703
32 mm	01/01/27/02/32/GHC	17520726
36 mm	01/01/27/02/36/GHC	17520732
41 mm	01/01/27/02/41/GHC	17520749

## CARE CON active | Typ III für sportliche und sehr aktive Anwender

Schaftlänge: 8,0 cm | Klebefläche: 7,0 cm

Durchmesser	Artikelnummer	PZN
25 mm	01/01/27/03/25/GHC	17520755
28 mm	01/01/27/03/28/GHC	17520761
30 mm	01/01/27/03/30/GHC	17520784
32 mm	01/01/27/03/32/GHC	17520790
36 mm	01/01/27/03/36/GHC	17520809
41 mm	01/01/27/03/41/GHC	17520815

Verpackungseinheit: 30 Stück

Verpackung: unsteril

# CARE FLOW Urinbeutel

Optimale und sichere Lösungen zum Anschluss an die Urinkondome sind zum Beispiel:



## CARE FLOW UB 750US

3-Kammer-Beinbeutelsystem

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN
750 ml	10 cm	04/01/750US/10/GHC	01972716
750 ml	30 cm	04/01/750US/30/GHC	12341427
750 ml	50 cm	04/01/750US/50/GHC	00226543

Das Beinbeutelsystem CARE FLOW UB 750US ermöglicht eine diskrete und zuverlässige Versorgung für den mobilen Anwender.



## CARE FLOW UB 2000US

Einmalbettbeutel

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN
2000 ml	90 cm	04/06/2000/90/GHC	12418549
2000 ml	130 cm	04/06/2000/130/GHC	08845487

Für die Nacht kann direkt an den Beinbeutel ein Bettbeutel angeschlossen werden, der UB 2000US. Mit einem Fassungsvermögen von 2000 ml ist eine ungestörte Nachtruhe möglich, dafür muss lediglich das Ablassventil des Beinbeutels auf Dauerleerung gestellt sein.



## Bettbeutelhalterung aus Kunststoff

mit Zwillingshalter zur Befestigung an Bettholmen

Artikelnummer	PZN
04/99/BHL/PVC/GHC	06718951

Diese und viele weitere Qualitätsprodukte der GHC wie zum Beispiel Haltesysteme für Beinbeutel finden Sie unter [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de).

Seit Gründung im Januar 2005 bietet die MPF Medicalprodukte Vertrieb Flensburg GmbH Produkte und Services rund um den Versorgungsbereich der ableitenden Inkontinenzprodukte und Verbrauchsmaterialien, unter anderem...

- Urin-Katheter
- Intermittierender Selbstkatheterismus
- Urin-Drainagesysteme und -beutel
- Befestigungssysteme
- Zubehör

Mit einer hohen Produktqualität, kompetenter Beratung und Einweisung sowie einem umfassenden Serviceangebot kümmert sich die MPF in engem Austausch mit Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und Angehörigen um eine bestmögliche Versorgung der Patienten.

Unser umfassendes Komplett-Sortiment sowie alles weitere zu MPF finden Sie unter [www.mpf-medical.de](http://www.mpf-medical.de).

Gerne stellen wir Ihnen zur Erstausrüstung einige Produktmuster zur Verfügung und unterstützen Sie bei der Anwendung.

Vereinbaren Sie gleich einen Termin.

Unser Kundenservice freut sich auf Ihren Anruf oder ihre eMail.



Birkclück 16  
24999 Wees  
Tel. 04 61 / 406 862 - 0  
Fax 04 61 / 406 862 - 99  
[info@mpf-medical.de](mailto:info@mpf-medical.de)  
[www.mpf-medical.de](http://www.mpf-medical.de)